

HAIDIG®

Kindergartenbedarf – Therapiebedarf – Befestigungslösungen



Hängesack

Maximallast 100 kg

Damit's sicher ist!

HAIDIG OHG

🏠 Oberste-Wilms-Straße 23 – 44309 Dortmund


☎ +49 (0)231 91 28 156

📠 +49 (0)231 91 28 157

@ info@haidig.de

🌐 www.haidig.de

🛒 www.kindergartenbedarf-haidig.de

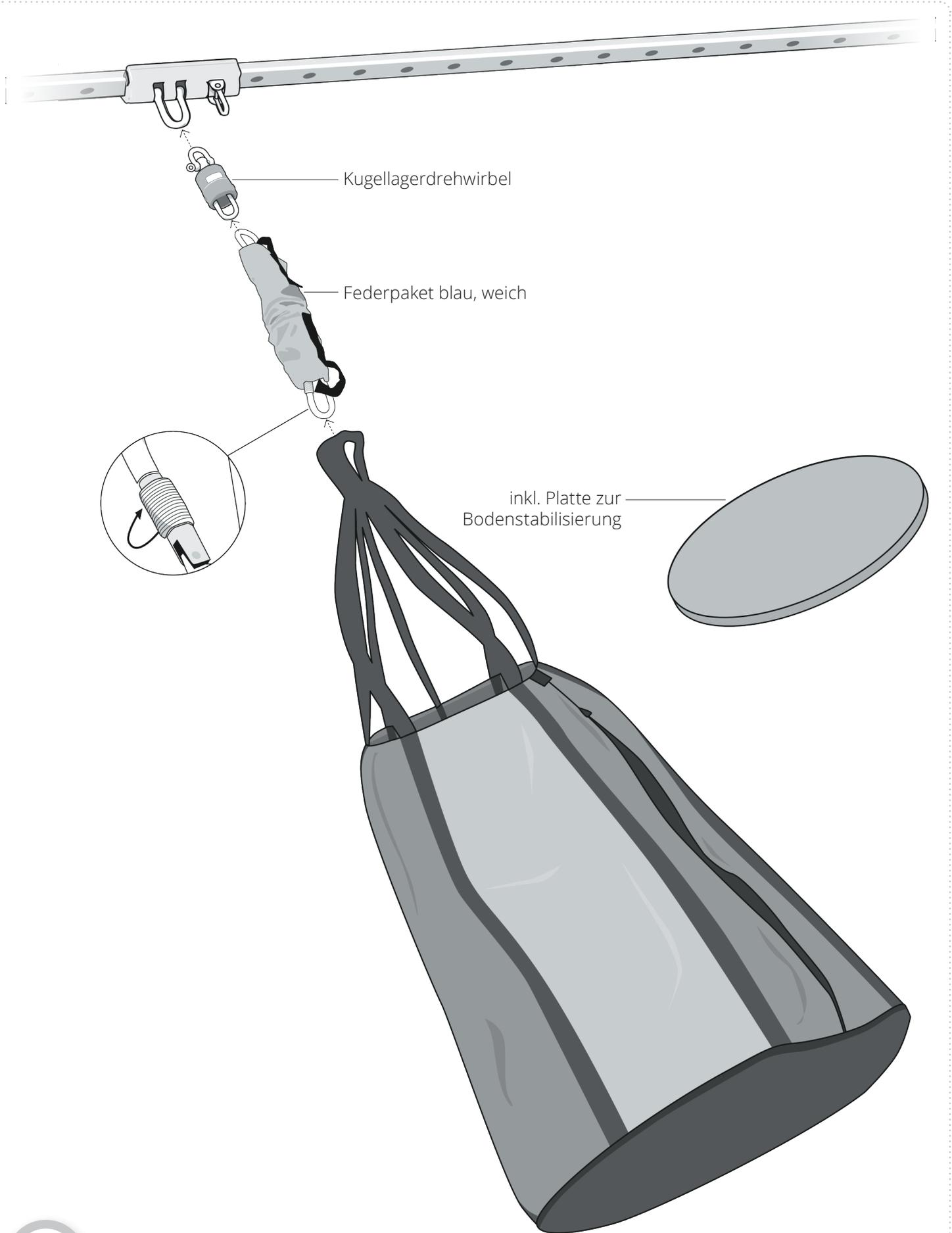

Sicherheitshinweis:

Achten Sie bitte auf eine fachgerechte Montage und verwenden hierfür nur Originalteile des Herstellers!
Prüfen Sie vor jedem Gebrauch alle mechanischen Teile auf ihre Festigkeit.

Herstellerinformation

Hängesack

Hersteller:
HAIDIG® OHG
Amtsgericht Dortmund
HRA 16342

Artikelnummer: 115000

Sicherheitshinweise:

Produkt nur mit ausreichendem Fallschutz und unter Aufsicht bzw. Anweisung von geschultem Fachpersonal einsetzbar.

Bitte angemessene Kleidung, wie Sportkleidung, Turnschuhe o. Ä. tragen und Uhren sowie Schmuck (Ringe, Halsketten, Armreifen, Ohrringe, Piercings o. Ä.) ablegen.

Maximallast	150 kg (ohne Federpaket)
Größe	ca. ø 60 x 90 cm, Gesamtlänge ca. 200 cm
Eigengewicht	ca. 4 kg
Material	Cordura, dunkelblau / rot Polypropylengurtband Boden Birkensterrholzplatte, 12 mm mit Schaumstoff gepolstert
Zubehör	inkl. 1 Kugellagerdrehwirbel, 1 Federpaket blau, weich (bis 80 kg)

Einsatzmöglichkeiten:

In Kindergärten und Kindertagesstätten, Familienzentren, ergo- und physiotherapeutischen Praxen, Frühförderstellen, Ganztagschulen, sowie in der Integrations- und Behindertenarbeit.

Anwendungsmöglichkeiten:

Der Hängesack kann an einem Deckenaufhängungssystem an **einem** Punkt aufgehängt werden (empfohlen wird unser HAIDIG® T-Schienensystem).

Beurteilungskriterien:



- Fördert höhere Konzentration auf Gleichgewichts-, Stimulation- und Tiefensensibilität (aufgrund eingeschränkter visueller Wahrnehmung)
- Wirkt sich unterstützend auf den Gleichgewichtssinn aus (durch Drehmöglichkeit)
- Fördert die Körperkoordination

Pflege und Reinigung:


Cordura ist ein robustes und unempfindliches Material. Trockener Schmutz lässt sich leicht herausbürsten. Bei stärkeren Verschmutzungen kann mit Wasser und einer Seifenlösung vorgereinigt werden. Bitte vermeiden sie eine extreme, mechanische Reinigung, diese kann zur Beeinträchtigung des Oberflächenmaterials führen. Desinfektion bitte ausschließlich mit alkoholbasierten Desinfektionsmitteln (Ethanol / Propanol). Die Verwendung anderer Substanzklassen können zu irreversiblen Beschädigungen der Oberfläche und des Materials führen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel!

Anwendungsbeispiele

1. HAIDIG® Decken-T-Schienensystem mit 4-Punkt-Aufhängung

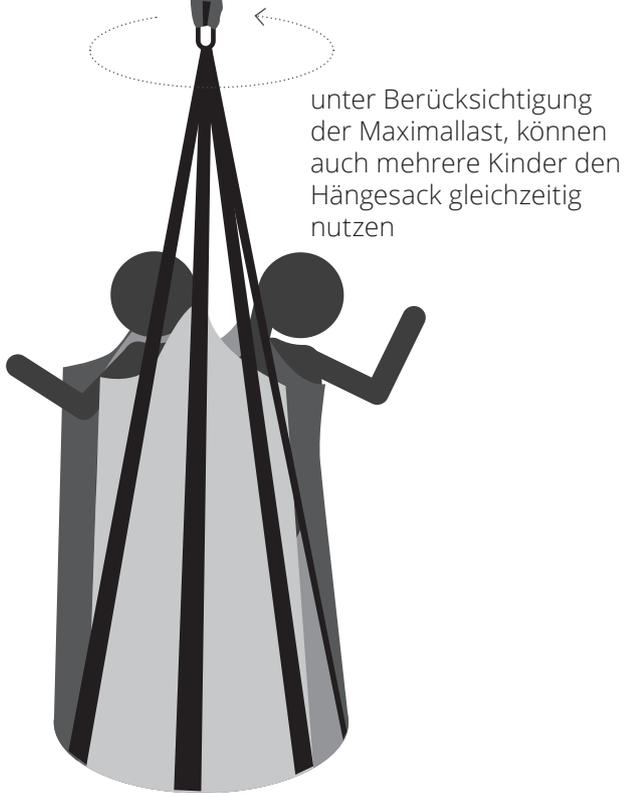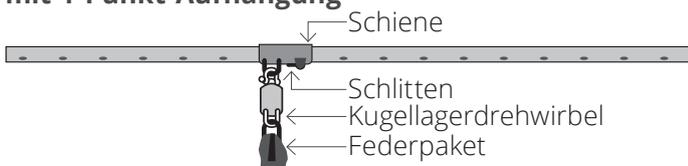

1. HAIDIG® Decken-T-Schienensystem mit 4-Punkt-Aufhängung

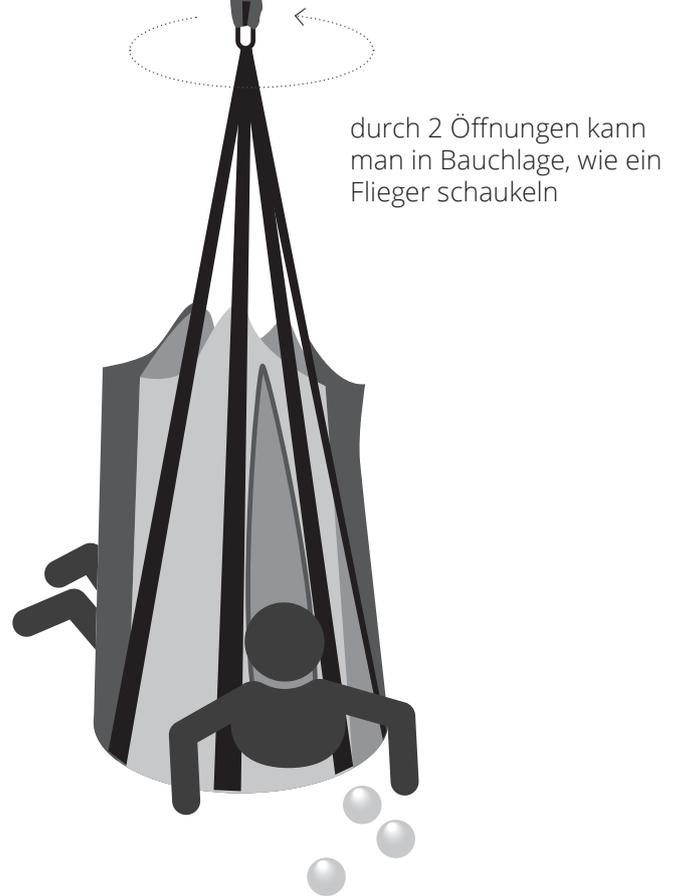

Rückzugsmöglichkeit

- ungestört spielen (Schutzraumcharakter)
- in einer Bewegungslandschaft kann der Hängesack am Ende des Schwebetunnels eingebaut werden

