


HAIDIG®

Kindergartenbedarf – Therapiebedarf – Befestigungslösungen

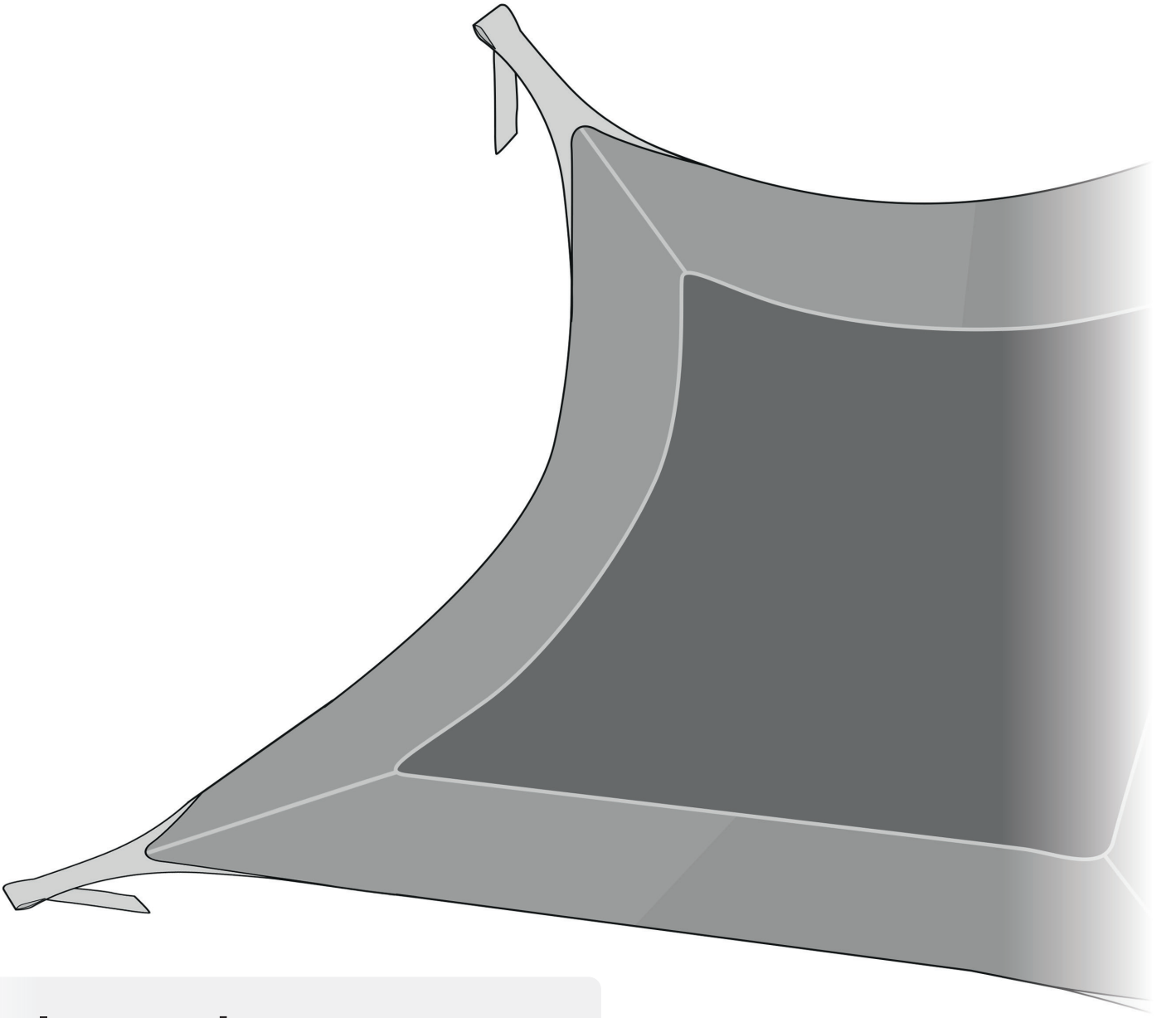

Flextuch

Maximallast 100 kg

Damit's sicher ist!

HAIDIG OHG

🏠 Oberste-Wilms-Straße 23 – 44309 Dortmund

☎ +49 (0)231 91 28 156


📠 +49 (0)231 91 28 157

@ info@haidig.de

🌐 www.haidig.de

🛒 www.kindergartenbedarf-haidig.de

Die Befestigungsanweisung gilt für
alle vier Ecken des Flextuches!

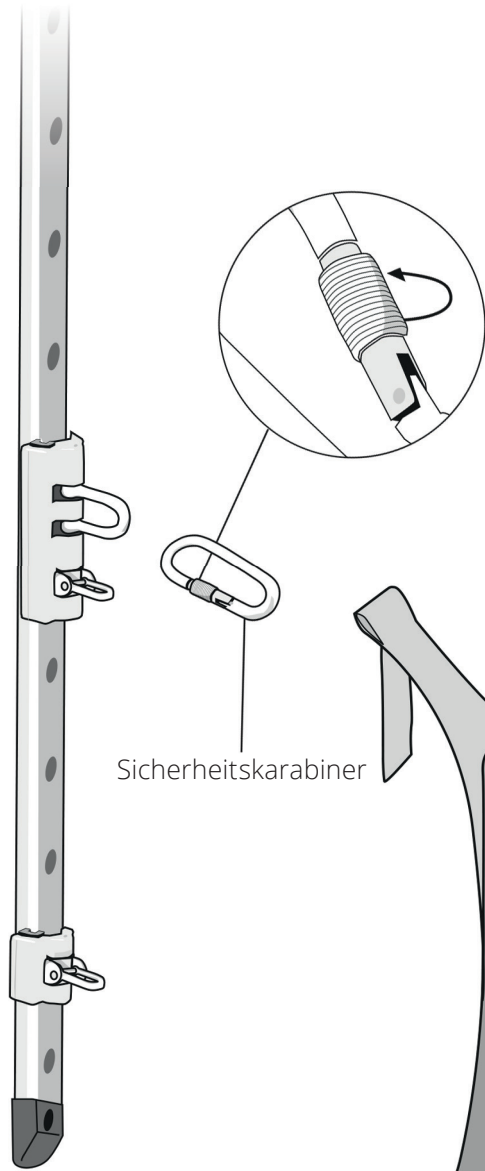

Sicherheitshinweis:

Achten Sie bitte auf eine fachgerechte
Montage und verwenden hierfür nur
Originalteile des Herstellers!
Prüfen Sie vor jedem Gebrauch alle
mechanischen Teile auf ihre Festigkeit.

Herstellerinformation

Flextuch

Hersteller:
HAIDIG® OHG
Amtsgericht Dortmund
HRA 16342

Artikelnummer: 113500

Sicherheitshinweise:

Produkt nur mit ausreichendem Fallschutz und unter Aufsicht bzw. Anweisung von geschultem Fachpersonal einsetzbar.

Bitte angemessene Kleidung, wie Sportkleidung, Turnschuhe o. Ä. tragen und Uhren sowie Schmuck (Ringe, Halsketten, Armreifen, Ohrringe, Piercings o. Ä.) ablegen.

Maximallast	100 kg
Größe	ca. 270 x 270 cm, Gurtverlängerungen: 4 x 250 cm mit Einhängemöglichkeiten alle 15 cm
Eigengewicht	ca. 6,6 kg
Material	Elastikstoff 170 x 170 cm, fester Planenstoff 50 cm breit, Gurtbandverlängerung
Zubehör	inkl. 4 Sicherheitskarabiner

Einsatzmöglichkeiten:

In Kindergärten und Kindertagesstätten, Familienzentren, ergo- und physiotherapeutischen Praxen, Frühförderstellen, Ganztagschulen, sowie in der Integrations- und Behindertenarbeit.

Anwendungsmöglichkeiten:

Das Flextuch kann an einem Wand- und / oder Deckenaufhängungssystem an **zwei** oder **vier** Punkten aufgehängt werden (empfohlen wird unser HAIDIG® T-Schienen-system).

Beurteilungskriterien:

- Ständige propriozeptive Anpassung
- Großflächiger taktiler Druck
- Gefühl von gehalten sein
- Freies, selbstbestimmtes Spiel
- Stärkung der Eigenaktivität
- Vermittlung eines sicheren Bewegungserlebnisses
- Starke vestibuläre Anregung
- Große therapeutische Variationsbreite

Pflege und Reinigung:

Planenstoff ist ein robustes und unempfindliches Material. Trockener Schmutz lässt sich leicht herausbürsten. Bei stärkeren Verschmutzungen kann mit Wasser und einer Seifenlösung vorgereinigt werden. Bitte vermeiden sie eine extreme, mechanische Reinigung, diese kann zur Beeinträchtigung des Oberflächenmaterials führen. Desinfektion bitte ausschließlich mit alkoholbasierten Desinfektionsmitteln (Ethanol / Propanol). Die Verwendung anderer Substanzklassen können zu irreversiblen Beschädigungen der Oberfläche und des Materials führen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel! Matten sind nur in Turnschuhen oder Socken zu betreten. Vor dem Zusammenfalten muss das Tuch richtig trocken sein, sonst kommt es zur Stockfleck-Bildung.