




KINDERMANGEL / DOPPELKINDERMANGEL PERSONENMANGEL

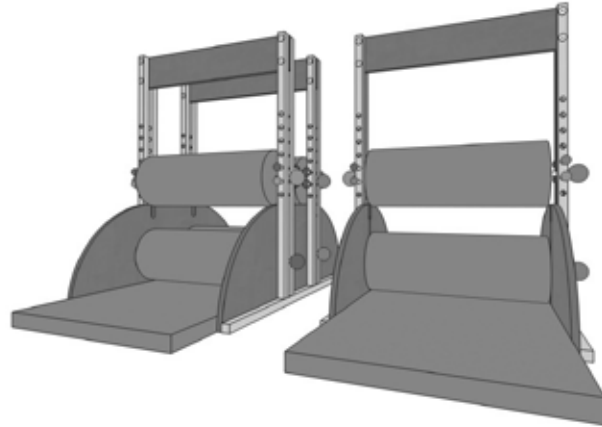


MONTAGEANLEITUNG

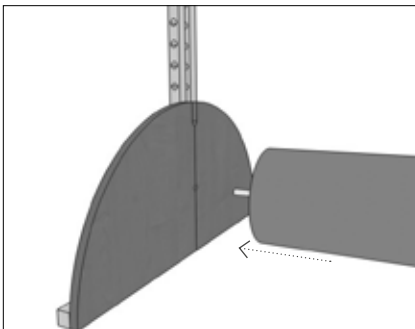


Schritt 1

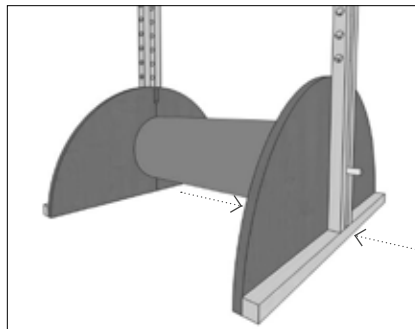


Schritt 2

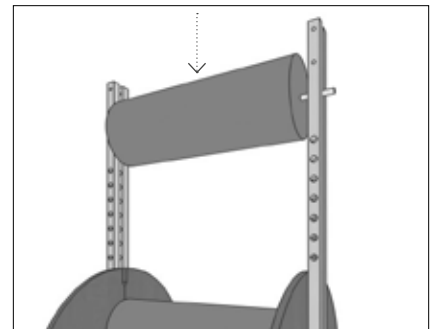


Schritt 3

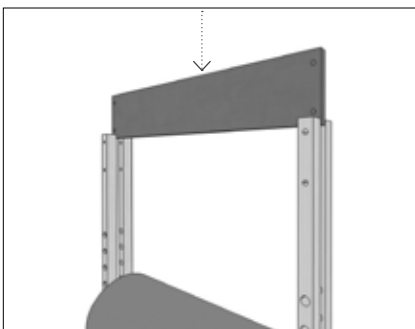


Schritt 4

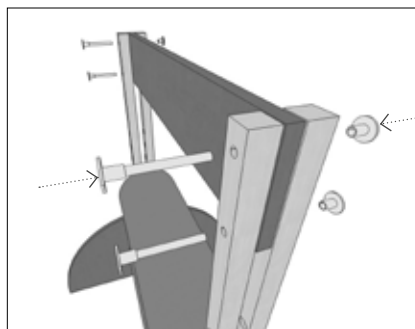

Schritt 5

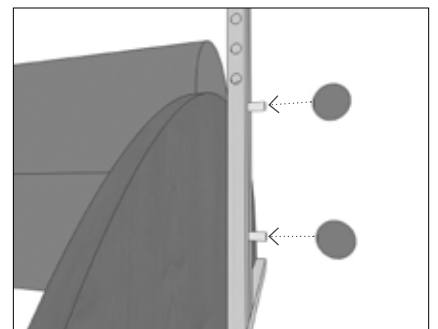


Schritt 6

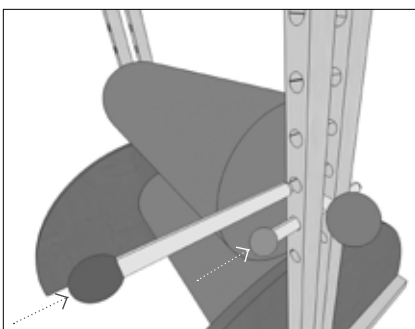

Schritt 7

Höhe individuell verstellbar,
auch Schrägstellung möglich.

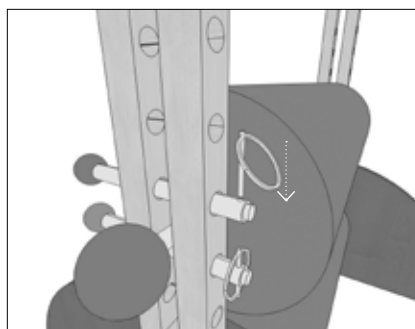

Schritt 8



Schritt 9

Matte darunter platzieren.

HERSTELLERINFORMATION

KINDERMANGEL / DOPPELKINDERMANGEL / PERSONENMANGEL

Artikelnummern:

Kindermangel, 2 Rollen: 119600

Doppelkindermangel, 4 Rollen: 119700

Personenmangel, 2 Rollen: 119500

Sicherheitshinweise:

Produkt nur mit ausreichendem Fallschutz und unter Aufsicht bzw. Anweisung von geschultem

Fachpersonal einsetzbar.

Bitte angemessene Kleidung, wie Sportkleidung, Turnschuhe o. Ä. tragen und Uhren sowie Schmuck (Ringe, Halsketten, Armbreife, Ohrringe, Piercings o. Ä.) ablegen. Die Kindermangel unterliegt einer ständigen mechanischen Beanspruchung. Eine regelmäßige Kontrolle der Schraubverbindungen ist deshalb nötig.

Maximallast

Art.-Nr.: 119600 & 119700 für Kinder bis 10 J. und 50 kg Körpergewicht

Art.-Nr.: 119500 für Erwachsene bis 95 kg Körpergewicht

Größe

Art.-Nr.: 119600: 75 x 108 x 82 cm (B/H/T)

Art.-Nr.: 119700: 75 x 108 x 110 cm (B/H/T)

Art.-Nr.: 119500: 135 x 150 x 165 cm (B/H/T)

Eigengewicht

Art.-Nr.: 119600: ca. 17,5 kg, Art.-Nr.: 119700: ca. 34 kg, Art.-Nr.: 119500: ca. 12 kg

Material

Gestell: Multiplex und Buche massiv, natur

Rollen: Schaumstoff, Innernern mit Holz verstärkt, außen: Kunstleder, blau

Bodenmatte: Kunstleder, blau

Zubehör

inkl. Bodenmatte mit Klettflaschen, Klett-Flauschband

Einsatzmöglichkeiten:

In Kindergärten und Kindertagesstätten, Familienzentren, ergo- und physiotherapeutischen Praxen, Frühförderstellen, Ganztagschulen, sowie in der Integrations- und Behindertenarbeit.

Anwendungsmöglichkeiten:

Die Kindermangel kann problemlos in jedem Raum aufgestellt werden. Die einfache Höhenregulierung der oberen Rolle ermöglicht das Arbeiten mit unterschiedlich starkem Druck. Nur für den Innenbereich!

Beurteilungskriterien:

- Verbesserung der motorischen Geschicklichkeit
- Bewirkt positives Wahrnehmungsempfinden
- Verbesserung der propriozeptiven Wahrnehmung
- Desensibilisierung der taktilen Überempfindlichkeit
- Förderung der Bewegungsplanung

Pflege und Reinigung:

Holz ist ein Naturprodukt. Dieses bitte nur mit einem nebelfeuchten, flusenfreien, weichen Tuch abwischen.

Zusatz von Naturholzpflegemitteln möglich (bitte erst an unsichtbarer Stelle testen).


Wir empfehlen ein Öl-Essiggemisch zur Pflege. Hierzu Speiseöl und Essig zu gleichen Teilen zu einer sämigen

Emulsion schlagen und mit einem flusenfreien Tuch auftragen (bitte sparsam dosieren). Einmal jährlich angewendet, bleibt das Holz auch nach Jahren optisch attraktiv.

Bodenmatte und Rollen können mit Wasser und einer Seifenlösung gereinigt werden. Bitte vermeiden sie eine extreme, mechanische Reinigung, diese kann zur Beeinträchtigung des Oberflächenmaterials führen. Desinfektion bitte ausschließlich mit alkoholbasierten Desinfektionsmitteln (Ethanol / Propanol). Die Verwendung anderer Substanzklassen können zu irreversiblen Beschädigungen der Oberfläche und des Materials führen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel! Matten sind nur in Turnschuhen oder Socken zu betreten.


KINDERMANGEL & DOPPELKINDERMANGEL

ANWENDUNGSBEISPIELE

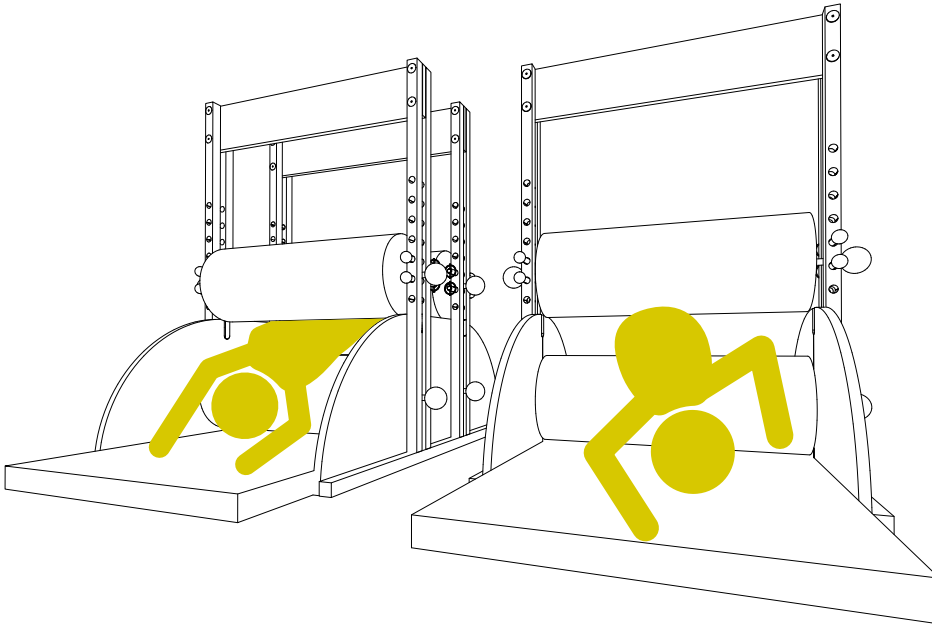


Die Kindermangel kann problemlos in jedem Raum aufgestellt werden. Die Kindermangel ist ein unentbehrliches Hilfsmittel für alle Therapeuten, Ergotherapeuten und Eltern, die auf der Suche nach einer effektiven Behandlungsmethode sind. Unter anderem wird diese bei Kindern angewendet, die nicht einschätzen können, wo ihr Körper anfängt, und endet oder bei Überempfindlichkeit gegen Berührungen.

Durch das einfache Regulieren der oberen Rolle (in der Höhe), kann mit unterschiedlich starkem Druck gearbeitet werden. Das Durchrollen zwischen den beiden Rollen, wie in einer Mangel, löst positive Reize aus. Es wird die propriozeptive Wahrnehmung verbessert, die Tastrezeptoren der Haut stimuliert und die taktile Überempfindlichkeit (taktile Hypersensibilität) desensibilisiert.

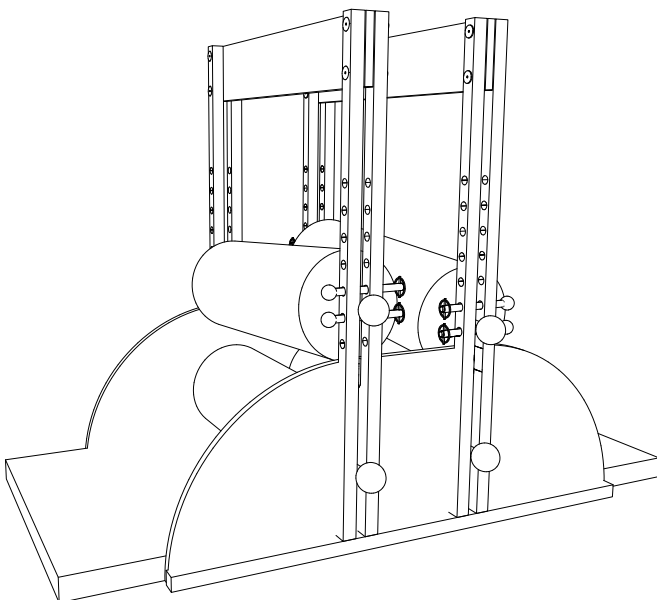

Die Rollen lassen sich auch Schräg stellen zur Förderung der Bewegungsplanung

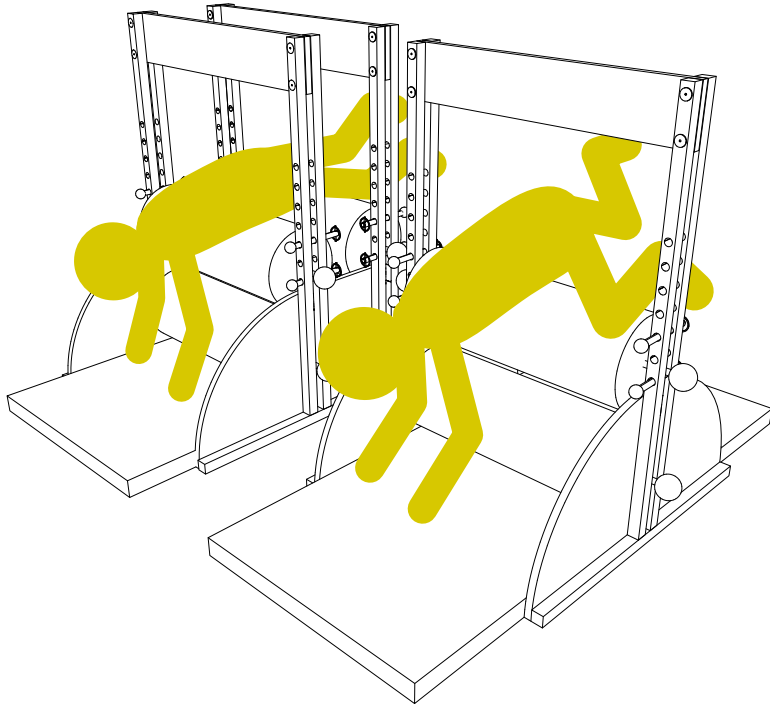

Die Kindermangel verbessert die motorische Geschicklichkeit. Statt sich durchzurollen, kann man Kinder auch darüber klettern lassen. Die Kindermangel lässt sich wunderbar in einen Bewegungsparcours einbinden.

