


# HAIDIG®

Kindergartenbedarf – Therapiebedarf – Befestigungslösungen

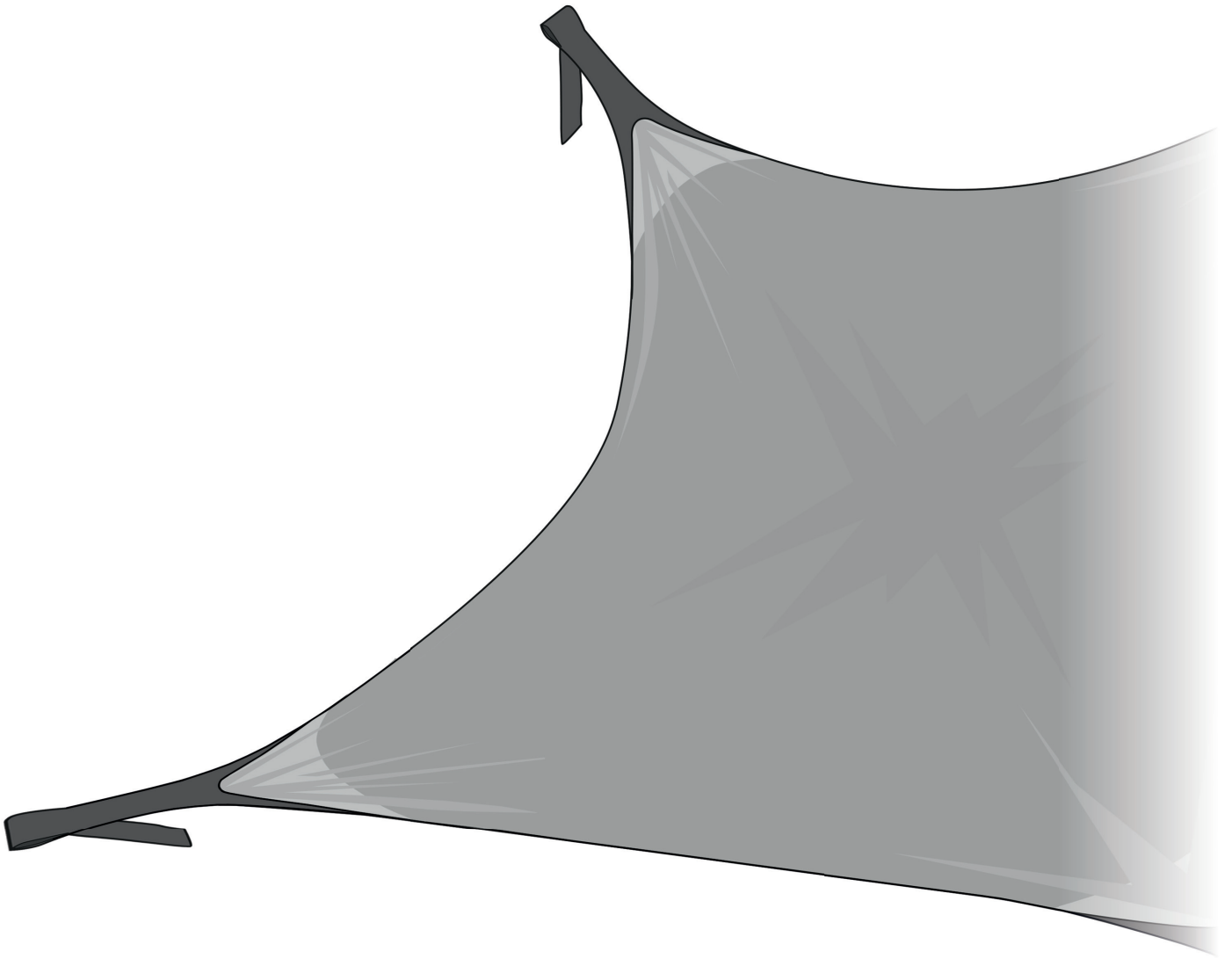

## Schwebetuch

Maximallast 200 kg

*Damit's sicher ist!*

### HAIDIG OHG

🏠 Oberste-Wilms-Straße 23 – 44309 Dortmund

☎ +49 (0)231 91 28 156

📠 +49 (0)231 91 28 157


@ info@haidig.de

🌐 www.haidig.de

🛒 www.kindergartenbedarf-haidig.de

Die Befestigungsanweisung gilt für  
alle vier Ecken des Schwebetuches!

Federpaket rot, hart

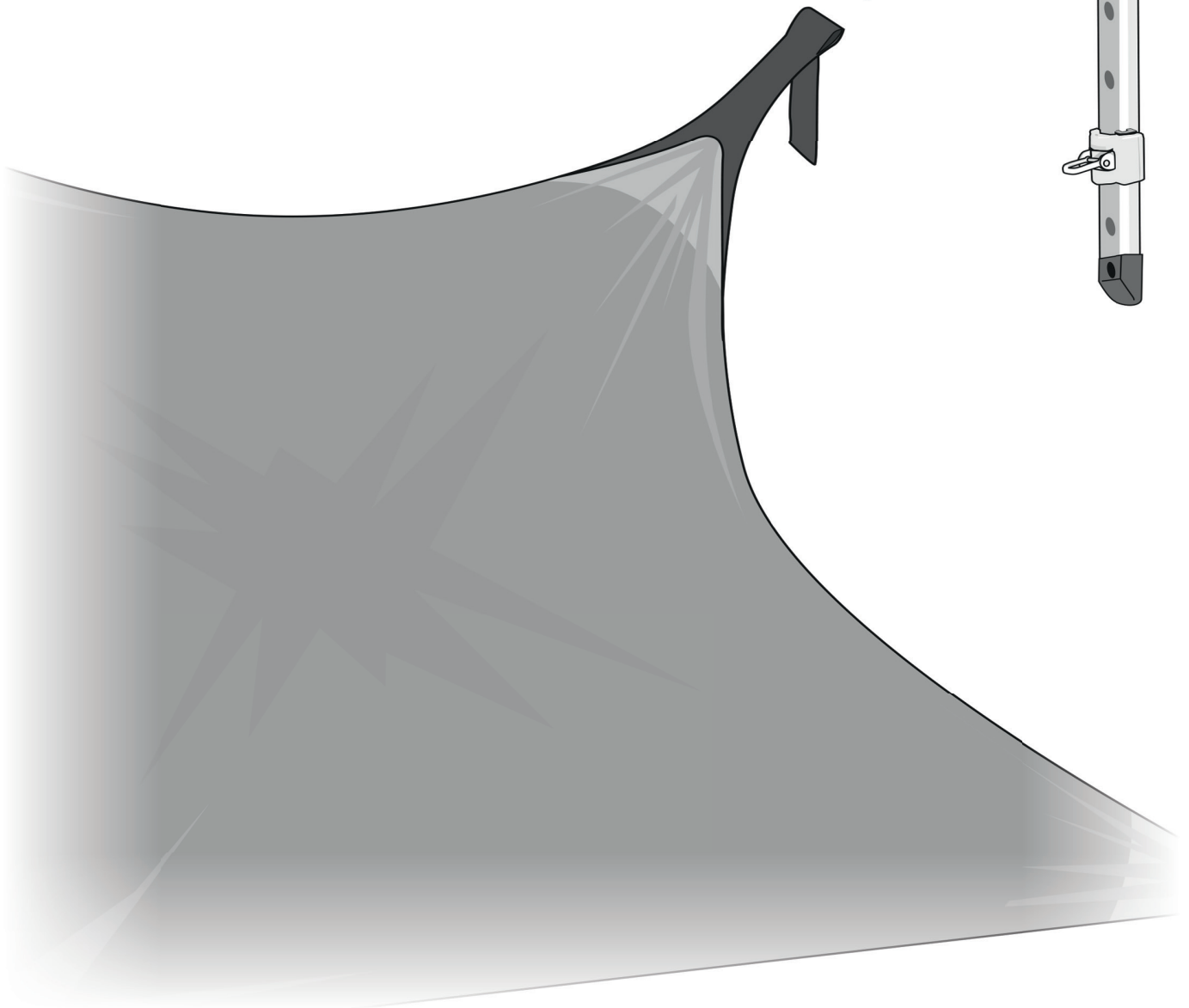

**Sicherheitshinweis:**

Achten Sie bitte auf eine fachgerechte Montage und verwenden hierfür nur Originalteile des Herstellers! Prüfen Sie vor jedem Gebrauch alle mechanischen Teile auf ihre Festigkeit.

# HerstellereinFORMATION

# Schwebetuch

**Hersteller:**  
HAIDIG® OHG  
Amtsgericht Dortmund  
HRA 16342

**Artikelnummer:** 111000

## **Sicherheitshinweise:**

**Produkt nur mit ausreichendem Fallschutz und unter Aufsicht bzw. Anweisung von geschultem Fachpersonal einsetzbar.**

Bitte angemessene Kleidung, wie Sportkleidung, Turnschuhe o. Ä. tragen und Uhren sowie Schmuck (Ringe, Halsketten, Armreifen, Ohrringe, Piercings o. Ä.) ablegen.

<b>Maximallast</b>	200 kg
<b>Größe</b>	ca. 250 x 250 cm, 4 Polypropylengurte á 250 cm mit Laschen
<b>Eigengewicht</b>	ca. 5 kg
<b>Material</b>	Cordura, Polypropylengurtband
<b>Zubehör</b>	inkl. Transporttasche, 4 Federpakete rot, hart

## **Einsatzmöglichkeiten:**

In Kindergärten und Kindertagesstätten, Familienzentren, ergo- und physiotherapeutischen Praxen, Frühförderstellen, Ganztagschulen, sowie in der Integrations- und Behindertenarbeit.

## **Anwendungsmöglichkeiten:**

Die Schwebetuch kann an einem Wand- und / oder Deckenaufhängungssystem an **zwei** oder **vier** Punkten aufgehängt werden (empfohlen wird unser HAIDIG® T-Schienensystem).

## **Beurteilungskriterien:**

- Förderung und Verbesserung der gesamten vestibulären Wahrnehmung
- Förderung der kinästhetischen- und propriozeptiven Wahrnehmung (Stellungs-, Kraft-, und Bewegungssinn)
- Förderung der Bewegungsplanung und Körperkoordination
- Förderung der haptischen (taktilen) Wahrnehmung
- Aufbau des Muskeltonus

## **Pflege und Reinigung:**

Cordura ist ein robustes und unempfindliches Material. Trockener Schmutz lässt sich leicht herausbürsten. Bei stärkeren Verschmutzungen kann mit Wasser und einer Seifenlösung vorgereinigt werden. Bitte vermeiden sie eine extreme, mechanische Reinigung, diese kann zur Beeinträchtigung des Oberflächenmaterials führen. Desinfektion bitte ausschließlich mit alkoholbasierten Desinfektionsmitteln (Ethanol / Propanol). Die Verwendung anderer Substanzklassen können zu irreversiblen Beschädigungen der Oberfläche und des Materials führen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel!